



PALOMACARE® Óvulos

10 óvulos vaginales
Con 10 mg de ácido hialurónico, ácido
18- β -glicirretínico y sustancias naturales

COMPOSICIÓN

Un óvulo contiene: Ácido hialurónico, ácido 18- β -glicirretínico, lactato cálcico, ácido láctico, *Centella asiatica*, *Calendula*, *Arnica*, aceite del árbol del té, sílice coloidal, acetato de vitamina E, triglicéridos semisintéticos (suppocire BS2X).

INDICACIONES

Tratamiento para restablecer la microbiota lactobacilar vaginal. Coadyuvante en el tratamiento y prevención de afecciones de la mucosa vaginal de carácter inflamatorio y distrófico, vaginosis bacteriana, vaginitis micótica e infecciones urinarias recurrentes.

Las sustancias que componen la formulación ejercen una acción calmante y reequilibrante de la mucosa cuando el producto se utiliza después de una intervención quirúrgica (terapia láser, cirugía de alta frecuencia, cirugía con bisturí frío, crioterapia, episiotomías, etc.).

Gracias a su composición, **PALOMACARE® Óvulos** favorece el restablecimiento de las condiciones fisiológicas intravaginales naturales.

PRECAUCIONES DE USO

En mujeres embarazadas, el uso de óvulos debe limitarse a casos de necesidad real y bajo la supervisión directa de un médico.

No utilizar durante la menstruación y las hemorragias abundantes. No existen datos sobre el uso de Palomacare® óvulos en asociación con anticonceptivos locales, tanto masculinos como femeninos (incluido el DIU); por lo tanto, el uso de Palomacare® óvulos durante el empleo de este tipo de anticonceptivos no se recomienda sin haber recibido previamente el consejo de su médico y/o ginecólogo.

MODO DE USO

1 óvulo por la noche o según prescripción médica, introducido profundamente en la vagina, durante 10 días consecutivos. Para tratamiento de mantenimiento, usar al menos 5 noches consecutivas durante varios ciclos, después de la menstruación.

CÓMO ADMINISTRAR PALOMACARE® Óvulos

Para un uso correcto del producto sanitario es necesario:

- lavarse bien las manos antes de abrir el envase;
- sacar un solo óvulo del blíster;
- introducir suavemente el óvulo en la vagina, con los dedos, intentando llegar hasta el fondo para evitar que salga por accidente.



PALOMACARE®

Óvulos

10 óvulos vaginales
Con 10 mg de ácido hialurónico, ácido
18-β-glicirretínico y sustancias naturales

ADVERTENCIAS

Es posible que el uso durante un periodo prolongado pueda dar lugar a fenómenos de sensibilización, en cuyo caso debe suspenderse el tratamiento y consultar a un médico.

No usar el producto en caso de hipersensibilidad conocida a los componentes.

Efectos sobre la conducción o uso de máquinas: no se han notificado efectos sobre la capacidad para conducir vehículos de motor y manejar maquinaria.

No utilizar después de la fecha de caducidad, no ingerirlo, mantenerlo fuera del alcance de los niños.

Guarde el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz y de fuentes de calor.

PRESENTACIÓN

10 óvulos vaginales de 2 g.

PROPIEDADES

PALOMACARE® Óvulos, gracias a un sistema tampón a base de ácido láctico y lactato cálcico, favorece el restablecimiento inmediato del pH vaginal fisiológico (pH 4,2). La rápida acidificación del entorno vaginal inhibe el crecimiento de los microorganismos responsables de la vaginosis bacteriana. El ácido hialurónico, presente en forma de sal sódica, a una dosis de 10 mg por óvulo, hidrata y lubrica el entorno vaginal y favorece la función celular. Este polisacárido natural, presente en el organismo, es capaz de mantener un entorno hidratado gracias a sus propiedades higroscópicas, ayudando así al proceso de regeneración tisular. La presencia de Vitamina E en **PALOMACARE® Óvulos** asegura una actividad antioxidante frente a los radicales libres y una acción protectora sobre las mucosas. El aceite del árbol del té protege contra los cambios en la microbiota vaginal. El ácido 18-β-glicirretínico y los compuestos presentes en los extractos vegetales *Centella asiatica*, *Calendula* y *Arnica* tienen un efecto calmante, contrarrestan los procesos inflamatorios y contribuyen al restablecimiento de la funcionalidad óptima de la mucosa vaginal.



AMP BIOTEC s.r.l.

Via Cortenocera

San Salvatore Telesino (BN) – Italia



ES PROCARE HEALTH IBERIA, S.L.

Av. Miguel Hernández 21, Bajo

46450 Benifaió (Valencia) – España

Procare
Health
Naturally woman



Rev 10/2025

001/051/002